

Elite cleaner

Розчин для очищення

Для всіх видів контактних лінз

Об'єми розчину доступні в Україні: 40ml.

Склад: Активний інгредієнт: неіонні речовини для очищення.

Консервант: PHMB 0,002%

Інструкції з використання: Відкрити флакон, для цього відкрутити кришечку, щоб зламати гарантійне запечаткування.

Ретельно вимити та висушити руки.

Зняти лінзу, покласти на долоню та нанести кілька крапель Еліт Клінер на кожен бік лінзи, протерти вказівним пальцем іншої руки протягом 30 секунд.

Сполоснути лінзи з обох сторін БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ РОЗЧИНОМ. Після дезінфекції можна відразу одягати лінзи.

Забороняється торкатися кінчика піпетки флакона, щоб запобігти зараженню розчина.

Після використання переконатися в тому, що флакон закритий як слід.

Застережні заходи: Тримати у недоступному для дітей місці.

Зберігати засіб при температурі від 4 °С до 25 °С.

У випадку подразнення очей припинити використання та негайно звернутися за допомогою до лікаря або спеціаліста з контактної корекціїзору. Після нанесення Еліт Клінер забороняється відразу одягати контактні лінзи, їх слід попередньо промити як зазначено вище.

Перед використання засобу переконатися у цілісності гарантійного запечаткування.

Забороняється користуватися засобом, якщо після відкриття флакону пройшло більше 3 місяців. Перед використанням збовтати флакон.