

Regard® K

Об'єми розчину доступні в Україні: 120ml.

Багатофункціональний розчин для твердих та газопроникних контактних лінз REGARD® К РГП ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРІГАТИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ Дякуємо за те, що обрали REGARD® К РГП, новий научний винахід для догляду за короткими та газопроникними контактними лінзами, який робить їх комфортними та гігієнічними. REGARD® К РГП містить активний дезінфікуючий розчин (складна стабілізована молекула ОхуChlorite®), яка перетворюється на натуральні складові СЛІЗ (H₂O та NaCl), з утворенням кисню. Корисно впливає на здоров'я очей завдяки відсутності таких консервантів, як PHMB.

REGARD® К РГП очищує, промиває, дезінфікує, захищає та змащує жорсткі та газопроникні контактні лінзи. Крім того розчин REGARD® К РГП знищує протеїнові залишки, які утворюються на поверхні контактних лінз, іоністери, ізотонічний розчин, що містить очищену воду, хлорид натрію, борну кислоту, гідроксипропілметилцелюлозу, полоксамір та ОхуChlorite®.

Інструкції для користування

Впевнитися, що герметичне закриття флакону не було пошкоджено. Завжди ретельно мийте руки перш ніж торкатися лінз. Нанести кілька крапель REGARD® К РГП на контактні лінзи та легенько протерти, щоб очистити поверхню. Сполоснути лінзи REGARD® К РГП, щоб змити бруд. Ніколи не полоскати водою з під крану. Завжди користуватися аутентичним контейнером для лінз від REGARD® К РГП. Відкрити кришку на контейнері цієї лінзи, що бажаєте поставити (кришка з серцем для лінзи лівого ока або кришка без серця для лінзи правого ока), заповнити місткість до самого краю розчином REGARD® К РГП. Покласти лінзу у відповідний відсік так, щоб її зовнішній бік дивився на дно місткості. Перевірити також, щоб лінзу було покладено таким чином, щоб не зашкодити їй під час закриття контейнера для лінз. Щільно зачистити та перегорнути контейнер з лінзами не менш ніж один раз. Залишити лінзи у розчині протягом мінімум шести ГОДИН, для дезінфекції та знищення протеїнових залишків. REGARD® К РГП вбиває шкідливі мікроорганізми, а також їх токсини та ензими. Якщо зберігати лінзи протягом більш ніж тридцяти днів, потрібна повторна дезінфекція перелік використанням Нанести одну або дві краплі REGARD®

К РГП на внутрішню поверхню лінзи перед надяганням, щоб зробити цей процес зручнішим. Сполоснути контейнер для лінз розчином REGARD® К РГП та залишити його сохнути на повітрі.

Застереження

Не використовуйте засіб при наявності ушкоджень флакону або його кришки. REGARD® К РГП не можна використовувати повторно. Уникати торкання будь-якої поверхні кінчиком піпетки та щільно закривати ПІСЛЯ кожного використання. Зберігати при кімнатній температурі та тримати флакон на відстані від джерел тепла та сонячних променів не застосовувати після закінчення терміну зберігання. Після 90 днів з першого відкриття флакону викинути залишки розчину. Застосовувати завжди новий контейнер для лінз у додатку до розчину REGARD® К РГП. У разі неможливості вимити контейнер для лінз або, якщо контейнер має десормації, замінити його новим. Як з усіма засобами особистої гігієни, у разі виникнення подразнення або алергії на одну із складових речовин розчину, припинити його застосування та звернутися до лікаря Зберігати у недоступному для дітей місці. Не ковтати!