

ПЕРОКСИДНА СИСТЕМА ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ

Інструкція з застосування пероксидної системи REVUE^{disc}.

Цей вкладок з інструкцією містить всі необхідні інструкції для правильного використання пероксидної системи REVUE^{disc}, а також застережні заходи щодо її використання. Рекомендується уважно ознайомитися із вмістом вкладки з інструкціями та зберігати його для подальшого використання. Невідповідний догляд за контактними лінзами може стати причиною серйозних проблем з очима.

Показання

Система REVUE^{disc} призначена для догляду за всіма типами контактних лінз за виключенням кольорових/косметичних; забезпечує дезінфекцію, очищення, зберігання, зволоження, віддалення білків та відкладень, які щоденно накопчуються на контактних лінзах.

Вміст

3% -ний пероксидний розчин REVUE^{disc} з контейнером для контактних лінз, оснащений капітаційним диском.

Описання продукту

Пероксидна система REVUE^{disc} складається з 3% -ного пероксидного розчину з буферним середовищем, стабілізованого без додання консервантів, що поставляється разом з контейнером для лінз та капітаційним диском. Перібуваючи в контейнері для лінз, пероксид водню виконує очищувальну та дезінфекційну дію.

Одночасно з цим під дією капітаційного диска його частинки перетворюються на воду та кисень. Таким чином утворюється нейтральний сольовий розчин, що дозволяє користуватися контактними лінзами відразу після обробки.

Протипоказання

Забороноюється користуватися у разі підвищеної чутливості до одного з компонентів.

Інструкція з використання

Перш, ніж користуватися контактними лінзами, ретельно вийміть, сполосніть та висушіть руки.

- Відкрийте кришку відділення, позначеного літерою I, вставте лінзу піску у відповідні виступи відділення.
- Закрийте кришку, слідуючи за тем, щоб випадково не продавити лінзу.
- Повторіть цю операцію з другою лінзою, вставивши її у відділення, позначене літерою II.
- Заповніть розчином REVUE^{disc} контейнер, оснащений капітаційним диском, до вказаної позначки.
- Слідуючи за тем, щоб не заповнити контейнер надто великою або недостатньою кількістю розчину!
- Вставте стерилізаційну капсулу в контейнер для контактних лінз з розчином REVUE^{disc}.
- Закрийте контейнер, не боліючи!
- Притисніть контейнеру вертикальному положенні.
- На правильну дію продукту вказує тонка бульбашка милою під час контакту між розчином та капітаційною сіткою всередині контейнера для лінз; якщо цього не відбувається, не користуйтеся продуктом.
- Залишайте прийнятні на 6 годин або на ніч, щоб розчин REVUE^{disc} подіяв, а також щоб відбулася повна нейтралізація.
- Якщо контактні лінзи залишаються в розчині REVUE^{disc} довше 24 годин, перед одяганням лінз слід повторити процес очищення.
- Після очищення та дезінфекції можна одягати лінзи. У випадку очей з підвищеною чутливістю рекомендується перед одяганням лінз сполоснути їх у сольовому розчині.
- Використаний розчин вилітає.
- Сполосніть контейнер та стерилізаційну капсулу для лінз сольовим розчином, потім залиште відкритими, щоб просохли.
- Забороняється для сполоскування користуватися проточною водою.

Застережні заходи

Забороноюється застосовувати з контейнером для лінз будь-які інші розчини, окрім розчину REVUE^{disc}.

Забороноюється використовувати інші продукти з пероксидною системою REVUE^{disc}.

- Переконайтеся, щоб капітаційний диск, повністю вилітає, знаходячись всередині контейнера для лінз.
- Під час дезінфекційної обробки лінз не візьміть кришечку з контейнера, щоб її.
- Користуйтеся розчином протягом 2 місяців після відкриття флакона. Після завершення зазначеного періоду використання REVUE^{disc} слід викинути.
- Після кожного використання слід ретельно закрити флакон і зберігати його при температурі від 5 до 25° C в захищеному від дії прямого сонячного світла та джерел тепла місці. При температурі, що перевищує зазначеному, флакон може надуватися. В такому випадку відкрити флакон небезпечно.
- Щоб запобігти зараженню, забороняється торкатися кімочком гігієни будь-яких поверхонь.
- Викласти у недоступному для дітей місці.
- Забороняється користуватися розчином, якщо сардиніне запечатувальне флакона пошкоджене.
- Забороняється використовувати, якщо об'єктив використаний.
- Завжди користуватися лінзами тим контейнером, що продається разом із системою REVUE^{disc}, від час купівлі нової упаковки кожного разу замовляти його.
- Якщо випадково розчин REVUE^{disc} потрапляє, промити великою кількістю чистої води, щоб уникнути утворення пелли.

Застереження

- Забороняється використовувати з кольоровими контактними лінзами.
- Забороняється використовувати проточну воду з під'єрми для промивання лінз; з цієї метою завжди використовувати сольовий розчин або багаторозподільний розчин.
- Ця не нейтралізований розчин REVUE^{disc} ніколи не повинен торкатися очей, тому що розчин пероксиду викликає сольову печію. Якщо це станеться, добре промити очі великою кількістю проточної води.
- Розчин призначений для одноразового використання, після використання його слід викинути. Не копати.
- Під час носіння лінз перш, ніж користуватися будь-якими офтальмологічними препаратами, слід спершу порадитися зі спеціалістом.

Небажані побічні ефекти

У випадку запалення, тривалого подразнення або іншого несподіваного впливу на очі припинити користуватися розчином REVUE^{disc} та звернутися за допомогою до спеціаліста.

Склад

Пероксид водню 3%, фосфатний буферний розчин; стабілізований 0,03% -ною етилендіамінтетра-три-оціаном та фосфорною кислотою.

Уповноважений представник в Україні:

FOB -Компарт Лайн-Оптейв
49021, Україна, м. Дніпро, вул.Молодітгородська, буд.70, оф.12

Виробник: Vifa Research Srl
Via Barante di Canobbio, 4 - 00032, Арена (RM), Italia

